

**WIDE
band**[®]
The New Standard in Male External Catheters

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΑΣ

- Φροντίστε να μην ενοχλούν οι τρίχες στην περιοχή.
- Αν είναι μεγάλες κόψτε τις λίγο με ένα ψαλίδι.



- Πλύνετε καλά τα χέρια σας και το πέος σας με ένα ουδέτερο σαπούνι και στεγνώστε το.



- Ανοίξτε το αποστειρωμένο σακουλάκι με προσοχή, ώστε να μην έρθει σε επαφή με λερωμένα αντικείμενα.



- Ακουμπήστε την πεοκαλύπτρα πάνω στη βάλανο(κεφάλι του πέους), και αμέσως μετά τραβήξτε προς τα κάτω, ώστε να ξετυλιχτεί και να κολλήσει πάνω στο δέρμα.

- Δεν χρειάζεται να βάλετε κόλλα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί το συγκεκριμένο πεοκάλυπτρο είναι αυτοκόλλητο.



- Αμέσως μετά συνδέστε τον ουροσυλλέκτη, αφού αφαιρέσετε το μπλε προφυλακτικό κάλυμμα από μπροστά.



- Αλλάξτε την πεοκαλύπτρα κάθε πρωί και βράδυ πριν τον ύπνο, εκτός αν χρειαστεί να την αλλάξετε και ενδιάμεσα στη μέρα σε περίπτωση που ξεκολλήσει.



- Δοκιμάστε ποιο είναι το σωστό νούμερο για εσάς, ώστε και να μην είναι πολύ σφιχτή αλλά και να κολλάει σωστά ώστε να μην έχετε απώλεια.



- Για να βγάλετε εύκολα την πεοκαλύπτρα τοποθετήστε ένα βρεγμένο ζεστό πανάκι πάνω της για 2 λεπτά, και μετά τραβήξτε την προς τα πίσω.