

GLUTASEPT S

Έτοιμο προς χρήση διάλυμα για υψηλού βαθμού απολύμανση και ψυχρή αποστείρωση ιατρικών εργαλείων - ενδοσκοπίων και ιατροτεχνολογικών οργάνων



CE 0120

Εφαρμογή

Το Glutasept S είναι ένα υψηλού βαθμού απολυμαντικό με βάση τη Γλουταραλδεύδη και προορίζεται για:

- Απολύμανση επεμβατικών, μη επεμβατικών ιατρικών εργαλείων, οδοντιατρικών εργαλείων καθώς και ιατροτεχνολογικών οργάνων.
- Υψηλού βαθμού ψυχρή αποστείρωση ιατρικών εργαλείων, θερμοευαίσθητων υλικών και ενδοσκοπίων

Ιδιότητες

Το Glutasept S είναι ένα έτοιμο προς χρήση διάλυμα νερού με σταθεροποιημένη γλουταραλδεύδη. Είναι ιδιαίτερα δραστικό, γρήγορο και εύκολο στη χρήση. Το οργανικό φορτίο, δεν επηρεάζει την δραστηριότητα του έτοιμου διαλύματος. Είναι συμβατό με διάφορα υλικά: Μέταλλα (Αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, χαλκό, ορείχαλκο, ανοδιωμένο αλουμίνιο και χρωμιωμένο μεταλλικό ορείχαλκο), Συνθετικά υλικά (PVC, polypropylene, polyethylene), λάστιχο και πλαστικό.

Σύνθεση

Κάθε 100 g Glutasept S περιέχουν:

Ενεργά Συστατικά: 2.5 g Glutaraldehyde

Πρόσθετα: Αντιδιαβρωτικοί παράγοντες, υδατοδιαλυτό πολυμερές, άρωμα

Εμφάνιση: Διαυγές, διάφανο υγρό

pH: 6.0 - 8.0

Φάσμα Δράσης

Βακτηριοκτόνο, Μυκοβακτηριοκτόνο, Μυκητοκτόνο, Ιοκτόνο, Σποροκτόνο.

Δραστηριότητα	Μέθοδος	Χρόνος
Bactericidal (<i>Paeruginosa, S.aureus, E.hirae</i>)	EN 13727	15 min
Fungicidal (<i>C.albicans, A.niger</i>)	EN 13624	15 min
Mycobactericidal / tuberculocidal (<i>M.terrae, M.avium</i>)	EN 14348	15 min
Sporocidal (<i>B. Subtilis</i>)	EN 13704	60 min
Virucidal (<i>Poliovirus1, Adenovirus 5</i>)	EN 14476	15 min

Ταξινόμηση

Το Glutasept S είναι συμμορφούμενο με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα χημικά Απολυμαντικά Directive 93/42/CEE και έχει καταχωρηθεί ως Ιατροτεχνολογικό βοήθημα - Class IIb.

Τρόπος Χρήσης

Το Glutasept S είναι ένα σταθερό και έτοιμο προς χρήση διάλυμα. Ενεργοποιείται ή νερό ΔΕΝ θα πρέπει να προστεθούν στο διάλυμα. Είναι σταθερό και κατάλληλο προς χρήση για τουλάχιστον 28 ημέρες.

Η απολύμανση θα πρέπει να γίνεται με την πλήρη εμβάπτιση των προς απολύμανση αντικειμένων στο διάλυμα σύμφωνα με τον κάτωθι συστατώμενο χρόνο δράσης. Για να επιτύχετε υψηλού βαθμού απολύμανση των ιατρικών εργαλείων και οργάνων, αποσυναρμολογήστε όλα τα μέρη των εργαλείων το δυνατόν περισσότερο και εμβάπτιστε τα στο διάλυμα. Διασφαλίστε ότι όλες οι επιφάνειες και τα ανοίγματα των εργαλείων είναι πλήρως καλυπτόμενα από το διάλυμα και αφήστε το να δράσει. Μετά την απολύμανση, ξεπλύνεται με αποστειρωμένο νερό και στεγνώστε τα εργαλεία.

Στόχος	Φάσμα Δράσης	Χρόνος
Επεμβατικά και μη επεμβατικά Ιατρικά εργαλεία, θερμοευαίσθητα και θερμοάντοχα ιατρικά εργαλεία και συσκευές	Bactericidal mycobactericidal, virucidal and fungicidal	15 min
	Sporicidal	60 min

Η απολύμανση να γίνεται σε κλειστά δοχεία μόνον!

Συνθήκες Αποθήκευσης

Να φυλάσσεται σε καλά κλεισμένα δοχεία σε ξηρό και αεριζόμενο περιβάλλον, μακριά από την απ'ευθείας έκθεση στον ήλιο και σε θερμοκρασίες μεταξύ 2°C και 50°C. Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά. Μην αφήσετε το συμπύκνωμα στο περιβάλλον - για τη διάθεση των αποβλήτων, υπολειμμάτων και των κενών συσκευασιών δείτε ειδικές οδηγίες στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Συσκευασία

Κάνιστρα των 5 L

Χρόνος ζωής: 2 χρόνια

Εισαγωγή - Διάρθρωση για την Ελλάδα:

FBServices Μ.ΕΠΕ.

Λ. Μαραθώνος 19, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας Αττικής, Αθήνα

Τηλ. 210 2310622

E-mail: info@fbservices.gr